



レニーと学ぼう! インスリンポンプサークル Insulin pump Circle

ポンプ編

No. 3

「注入セットの装着による皮膚トラブルや血糖コントロール不良を防ぐために」の巻



Q

なぜ、注入セットは2～3日以内の交換と、装着部分を毎回変えることが必要なの？

A

注入セットを長期間装着したり、継続して同じ部分に装着したりすると、皮膚がかたくなり、血糖コントロール不良の原因となるんじゃ。そうすると、高血糖につながる恐れもあるから要注意なんじゃよ!


※注入セットの長期間の装着や、同じ部分への継続的な装着は、感染、皮膚のかゆみ、痛み、炎症の原因となる場合もあります。



注入セットの装着部分を毎回変えるポイントとは？


お腹の上に時計や文字を思い浮かべて装着部分を順番に変更します。

時計まわり

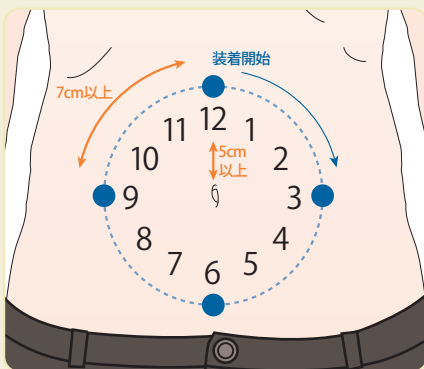

12時の位置から装着を開始。
3時→6時→9時と時計まわりに装着部分を変更。

M字やW字

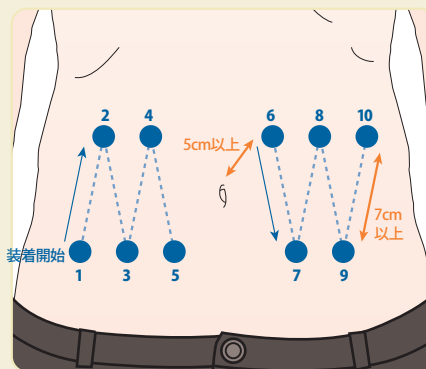

MやWの書き出し部分から装着を開始。
文字をなぞるように順番に装着部分を変更。

● 装着部分
----- 時計や文字のイメージ

注入セットは必ず
3日以内に交換してください。



インスリンと注入セットは2～3日以内に交換することが推奨されています

注意

注入セットの装着は必ず前回の装着部分から7cm以上、へそから5cm以上はなして行ってください。


注入セットは2～3日以内に交換すること、装着部分は毎回変えることが大事なんじゃぞ!



Check point!

注入セットの**長期間**の装着や、**同じ部分**への**継続的な**装着によるトラブルを防ぐために、下記内容について十分ご注意ください。

1 注入セットは**十分な皮下脂肪がある部分**を選んで装着する。

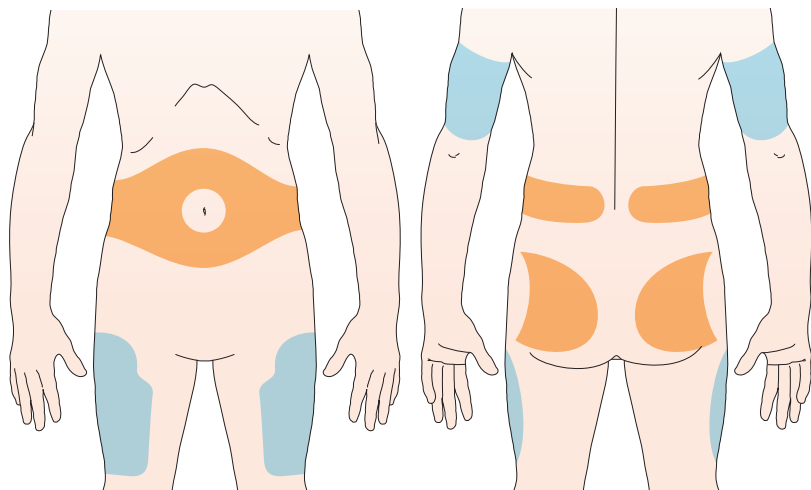

- 十分な皮下脂肪があり、装着に適している部分
- 装着が可能なその他の部分

装着を避ける部分

- 傷がある部分
- 皮膚がかたくなっている部分
- ベルトがあたる部分
- へそから5cm以内の部分
- 前回の装着部分から7cm以内の部分

注意 皮下脂肪の分布は年齢や性別などによって個人差があるため、適切な装着部分については主治医や看護師に相談してください。

2 注入セットの装着部分はアルコール綿などで消毒し、**清潔**にする。

3 注入セットは必ず**前回の装着部分から7cm以上、へそから5cm以上**はなして装着する。

※持続グルコースモニタ (CGM) を付けている場合、注入セットはグルコースセンサから7.5cm以上はなして装着してください。

4 注入セットは**傷がある部分や皮膚がかたくなっている部分、ベルトがあたる部分**を避けて装着する。

5 注入セットの装着部分は**毎回変える**。

6 注入セットは必ず**2～3日以内**に交換する。



製品を安全にご使用いただくため、必ず添付文書とユーザガイドを併せてご確認ください。

日本メドトロニック株式会社

ダイアビータス事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名:メドトロニックミニメド600シリーズ
医療機器承認番号:22500BZX00369000

販売名:パラタイムリザーバー
医療機器製造販売届出番号:13B1X00261D00001

販売名:インスリンポンプ 注入セット
医療機器認証番号:225ACBZX00013000

インスリンポンプやパーソナルCGMの使用法、アラーム対処などのトラブルでお困りのときは下記へご連絡ください



日本メドトロニック
24時間サポートライン

コール ミニ コール
0120-56-32-56

製品の使用方法やよくある質問などをご紹介します。



www.medtronic-dm.jp/

パソコン、スマートフォンやタブレット端末からもアクセスできます。

